


新型コロナウイルスPCR検査 検体採取・提出方法

①唾液採取 (注) 症状がある場合や他で検査を受けている場合は、当検査の利用をご遠慮ください。

1

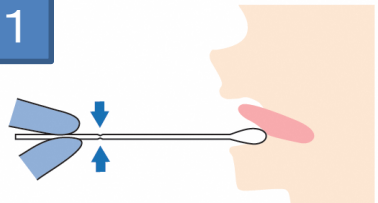

・綿部分に触れないように袋から綿棒を取り出します。

・綿棒を静かに口の中(舌下)に含み、唾液を十分に染み込ませます。※2分程度

2

・不活化液の入った容器のふたを開け、唾液を染み込ませた綿棒を入れて、綿棒の折れ目を容器のふちに合わせ、上部を折ります。

※折った上部は事業所で処分し、決して同封しないでください。



3

・ふたをしっかりと閉め、緩んでいないことを確認してください。

※唾液が付着したときはアルコール等で拭き取ってください。



<注意事項>

- 唾液採取の30分前から飲食・喫煙・歯磨き・口内洗浄を控えてください。
- 採取した唾液を入れた容器は涼しい場所で保管してください。
- 一度陽性になった方は、2カ月程度、当PCR検査の利用をご遠慮ください。

②依頼書の記入方法 (注) ちぎらずに提出してください。 ※1枚で10人分のため、10人以上の場合は複数枚記載ください。

集団検査依頼書 貴院控

株式会社SIメディアエンス

印字フリー欄

注意点



①「担当医」欄に事業所名の略称をカタカナで記載ください。(8文字以内:事業所を判別するため、略称の途中まででもOK)

②「その他」欄に検体本数を記載ください。

③「姓名」欄に被検者様の氏名をカタカナで記載ください。なお、キャンセルされた被検者様は二重線で消してください。

④氏名ラベルに被検者様の氏名をカタカナで記載ください。
※ラベルは4枚ありますが、1枚だけ使用し、検体容器に貼ります。

③ 検体梱包方法

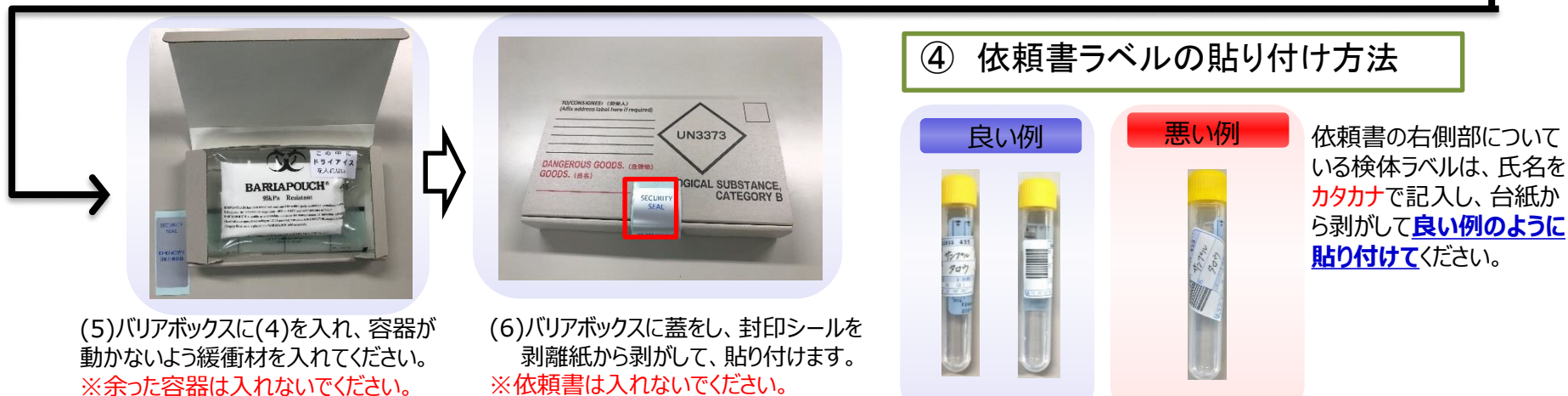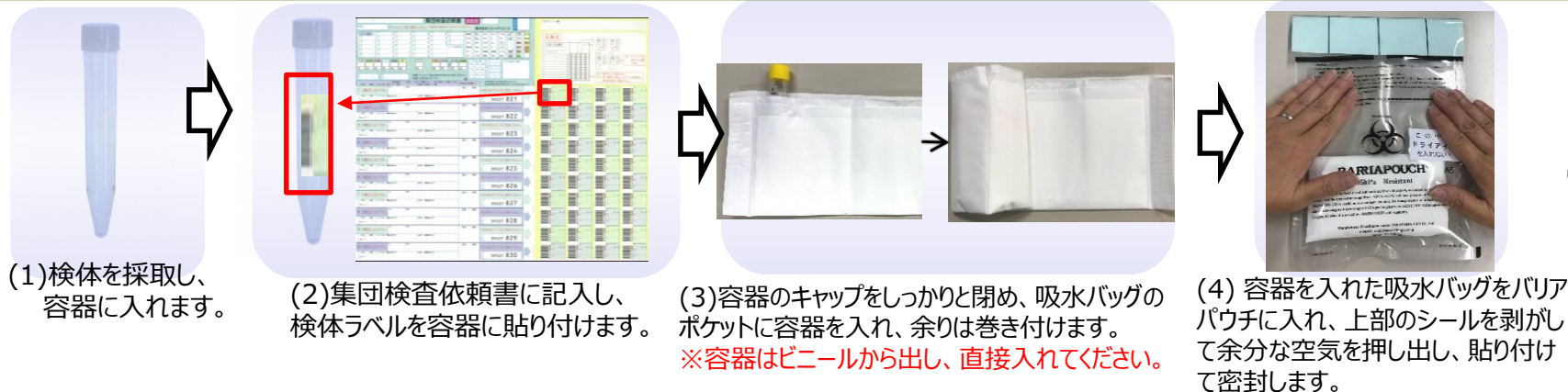

⑤ 吸水バッグとバリアパウチへの梱包本数

